

# VARILUX® 4D

VISIÓN ABSOLUTA. ENFOQUE INMEDIATO.

## CÓMO REALIZAR LAS NUEVAS MEDICIONES.

### PREPARACIÓN

1. Pegue el adhesivo azul 20 cm debajo de Visioffice.
2. En la pantalla de Visioffice, seleccione el Perfil del Cliente.
3. Acceda a la sección "Medidas".
4. Coloque el clip en el armazón del cliente.
5. Solicite que el cliente se coloque el accesorio.

### OJO DOMINANTE

1. Ubique al cliente frente a Visioffice a 1.20 metros de distancia.
2. En la sección "Medidas" haga un click en la cámara "ojo dominante".
3. Ajuste la cámara a la altura de los ojos del cliente, en el área que se destaca en el monitor.
4. Pida al cliente que sostenga el Dispositivo 4D, estire los brazos hacia el frente y mire hacia el adhesivo azul a través del recorte rectangular del dispositivo 4D (Imagen 1).
5. Presione el ícono de la "cámara" en el monitor.
6. El ojo dominante será exhibido en el monitor.

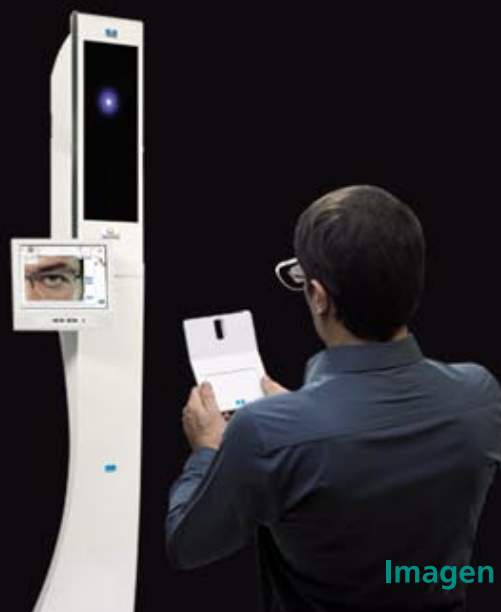


Imagen 1

### DISTANCIA DE LECTURA

1. En la opción de pantalla "Medidas", presione la cámara "distancia de lectura".
2. Ubique al cliente frente a Visioffice a 1.20 metros de distancia.
3. Pida al cliente que sostenga el Dispositivo 4D en una posición confortable de lectura (Imagen 2).
4. Pida al cliente para mirar la mini cartilla de lectura del Dispositivo 4D.
5. Presione el ícono "cámara" en el monitor.
6. La distancia de lectura será exhibida en el monitor.



Imagen 2